

# 元気でニャー アプリ操作マニュアル

Ver 1.0.2

# 1 ログオン

- メールで届くURLをクリックすると、ログオン画面が開きます
- キーとパスワードは自動入力されるので、通常は入力する必要はありません
- そのままLOGONボタンをクリックしてログオンします

こんにちは、元気でニャーです

あなたのストレージのキーを教えてください。これは全ての記録を管理する大切なキーです。他人に知らせないでください。

キー

アクセス権限はパスワードで変わります

LOGIN

## 2 体重測定

- ログオンすると、最初に関画面です
- 体重計から通知された測定記録を時系列順に表示します
- 様子をクリックすると、体重計に乗っているときの変化グラフを表示します

お知らせ

12/25 (VerUp) メニュー「体重測定の編集」で自動判定の調整が簡単になりました

体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

メニュー

管理者ボタン  
管理者だけ  
表示される  
管理メニューを  
表示

ページめくり

ページ 1/492

日付	名前	体重(kg)	様子(秒/g)	場所
12/26 03:57	モフモフ	5.84	<a href="#">66/0</a>	ごはん
12/26 03:49	モフモフ	5.91	<a href="#">196/26</a>	ごはん
12/26 03:45	スーちゃん	4.34	<a href="#">130/0</a>	ごはん
12/26 03:34	モフモフ	5.90	<a href="#">131/0</a>	ごはん
12/26 01:11	スーちゃん	4.30	<a href="#">93/18</a>	1階トイレ
12/26 01:09	スーちゃん	4.37	<a href="#">224/11</a>	ごはん
12/26 00:32	NA	3.16	<a href="#">159/27</a>	ごはん
12/25 23:49	モフモフ	5.91	<a href="#">159/0</a>	ごはん
12/25 23:39	モフモフ	5.84	<a href="#">133/33</a>	1階トイレ
12/25 23:00	モフモフ	4.22	<a href="#">121/17</a>	ごはん

測定日時

名前  
分からない  
ときはNAと  
表示

体重  
10g 単位

様子  
クリックで  
グラフ表示

場所  
設置場所の設定が  
ない場合は  
シリアル番号を表示

# 3 管理メニュー

- 管理メニューは全権限があるユーザだけ表示されます
- 閲覧権限のユーザには表示されません
- 友人などに見せる場合には閲覧権限のパスワードを教えてください

管理者のときだけ表示

4 ~ 10  
参照

12/25 (VerUp) メニュー「体重測定の編集」で自動判定の調整が簡単になりました

体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

11 ~ 13  
参照

体重測定の編集

ヘルプ

< < ページ 1/492 > >

日付	名前	体重(kg)	様子(秒/g)	場所
12/26 03:57	モフモフ	5.84	<a href="#">66/0</a>	ごはん
12/26 03:49	モフモフ	5.91	<a href="#">196/26</a>	ごはん

# 4 名前登録

- 猫の名前を登録します
- 多頭飼のときは、それぞれの名前を登録します
- 初めて登録する場合は、体重欄を0にすると、次回の測定値が入ります
- ブレ幅は名前を判定するときの材料となり、前回の測定値からブレ幅以内かどうかで判定します
- 最終測定日は最後に測定した日時が入ります
- 種類・誕生日の記入は自由です
- 名前の判定では、上から順に判定を行い、名前が空欄になったら止まります  
判定は、ブレ幅と過去の測定値からの推測を行います
- 名前の一覧から判定できなかった場合、NAという名前で体重が記録されます

二 体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

空欄の名前から下は探しません

名前	体重	ブレ幅	最終測定日	種類	誕生日
モフモフ	5.86	0.2	2020/12/26 05:38:06	雑種、黒	2010/07/01
スーちゃん	4.33	0.2	2020/12/26 06:36:24	雑種、三毛	2010/10/01

名前  
飼っている猫の名前

体重  
最後に測った体重  
最初に0を入力すると  
次回の測定値が入ります

ブレ幅  
多頭飼の場合、名前  
判定に使います

最終測定日  
最後に測定した日時

種類・誕生日  
自由に記入

保存

# 5 メール通知

- 体重を測定したら、結果をメールで通知します
- 最大3件までメールアドレスを登録できます
- 通知するメールのタイトルはキーワードを組み合わせて作れます
- メール本文に入れるURLは、管理者権限(全権限)・閲覧権限(閲覧)・なしが選べます
- ご自身には管理者権限を、友人などに見せる場合には閲覧権限にするとよいでしょう

二 体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

空欄のメールアドレスから下のメールアドレスには送りません

メールアドレス	タイトル	本文URL
toru.eguchi.ikehouse@gmail.com	{\$time} {\$name}は{\$weight}です。	全権限 ▼
eguchi.kaoru@gmail.com	{\$time} {\$name}は{\$weight}です。	閲覧 ▼
		なし ▼

保存

タイトルに書いたキーワードは変換されます

キーワード	変換先 (例)
{\$time}	日時 (10/22 12:34)
{\$name}	名前 (モフモフ)
{\$weight}	体重 (5.98kg)
{\$place}	設置場所 (1階トイレ)
{\$timespan}	掛かった時間 (120s)
{\$mdelta}	前後差 (38g)

メールアドレス  
最大3箇所まで  
送れる

タイトル  
メールのタイト  
ルを組み立て

本文URL  
中に載せる  
URLの権限

## 6 設置場所

- 体重計から送られてくる測定値と、設置場所の名前を対応づけます
- シリアル番号は体重計の裏側にSNから始まる番号で刻印されています
- シリアル番号を登録しない場合、体重測定の際の場所の欄には、シリアル番号が載るので、あとから対応づけを設定しても大丈夫です
- 設置場所にトイレの単語が混じっていると、トイレ回数やトイレ時間の集計の対象になります

二 体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

- 体重計の設置場所に名前をつけます
- 体重計の裏にSNから始まるシリアル番号が書いてあります
- シリアル番号はSNを取った数字だけを記入します。例えばSN100001の場合は「100001」
- 上に詰めてください。空欄があるとそこで対応は終了です
- 登録がない体重計から受信した記録の設定場所にはシリアル番号が表示されます
- トイレグラフで回数を集計するには、設置場所に「トイレ」の文字を含めてください

シリアル番号	設置場所
100001	ごはん
300016	1階トイレ
300002	2階トイレ右
200001	富士山ごはん
300006	2階トイレ左
300008	2階トイレ中
300013	富士山トイレ

**シリアル番号**  
SNを除いた番号だけ記入

**設置場所**  
トイレという単語が入っていると、トイレ回数や時間で集計の対象になる

保存

# 7 エクスポート

- 蓄積された測定結果をCSV形式でエクスポートできます
- エクスポートしたファイルは、EXCELなどで開き、自由に加工できます

☰ 体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

開始日付	終了日付
<input type="text" value="2000/01/01 00:00:00"/>	<input type="text" value="2999/01/01 00:00:00"/>

CSVでダウンロード

## 8 アカウント

- アプリにログオンする権限を設定します
- 権限はパスワードによって区別します
- アカウントの有効期限が表示されているので、切れるまえにアカウントをお願いします

二 体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

アクセス権限のパスワードを設定します。

種類	パスワード
設定や閲覧ができる	<input type="text" value="A123"/>
体重やグラフだけ閲覧ができる	<input type="text" value="mitemoiyo"/>

アカウントは2021/11/21 00:00:00で切れます。  
残り329日です。

# 9 体重測定 of 編集

- 測定した記録のうち、名前と場所をあとから編集できます
- 日付のボタンをクリックすると、編集画面を開きます
- 名前と設置場所を修正して保存してください
- 削除ボタンでは、この記録を削除します
- 「この名前と体重で自動判定も調整する」をチェックして保存すると最後の測定値として採用し、名前の判定の材料とします  
体重が大きく変化して名前がNAになってズレた場合には、  
名前を修正して、このチェックで最後の体重測定を変更します

12/25 (VerUp) メニュー「体重測定 of 編集」で自動判定 of 調整が簡単になりました

体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

編集ボタン  
ここをクリックして1行を編集

ページ 1/492

日付	名前	体重(kg)	様子(秒/g)	場所
12/26 05:30	モフモフ	5.79	<a href="#">100/14</a>	1階トイレ
12/26 03:57	モフモフ	5.84	<a href="#">66/0</a>	ごはん
12/26 03:49	モフモフ	5.91	<a href="#">196/26</a>	ごはん

体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

日時 2020/12/26 01:11:45

名前  
名前を変更

名前

体重 4.3 kg

設置場所  
判定の条件として採用

この名前と体重で自動判定も調整する

設置場所  
シリアル番号を  
名前なのに変更

設置場所

削除 キャンセル 保存

# 10

## ヘルプ

- アプリのバージョンなどを表示します
- バージョン番号は、お問い合わせの際、アプリの区別のためにご連絡ください

☰ 体重測定 体重G トイレ回数G トイレ時間G ログアウト

[元気でニヤー](#)

バージョン 5.5.3

Copyright© 2020 [ikehouse](#)

サポートブラウザ

Google chrome ○

Microsoft Edge ○


iOS Safari ○

Microsoft Internet Explorer ×

Firefox △ 一部見栄え異なる

# 11 体重G

- 体重のグラフを表示します
- 多頭飼の場合、みんな纏めてか、1頭1頭表示するか、選択します
- グラフにする範囲は、過去の測定回数から選びます

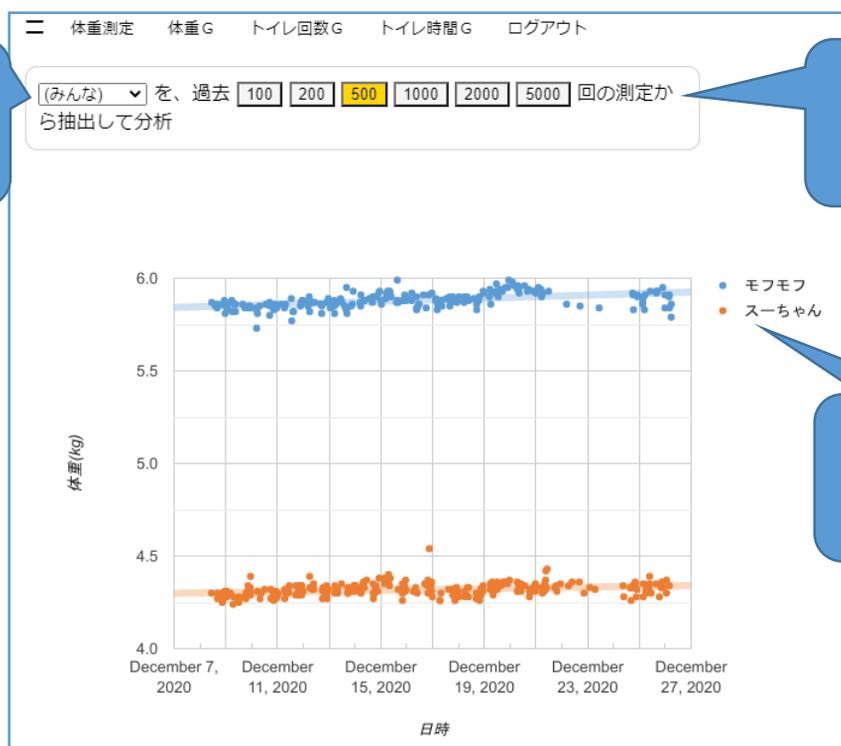


**頭数**  
みんな纏めてか  
個別かを選択

**測定回数**  
何回の測定を分  
析するかを選択

**名前**  
みんな纏めての場  
合は名前を区別

1頭を選んで

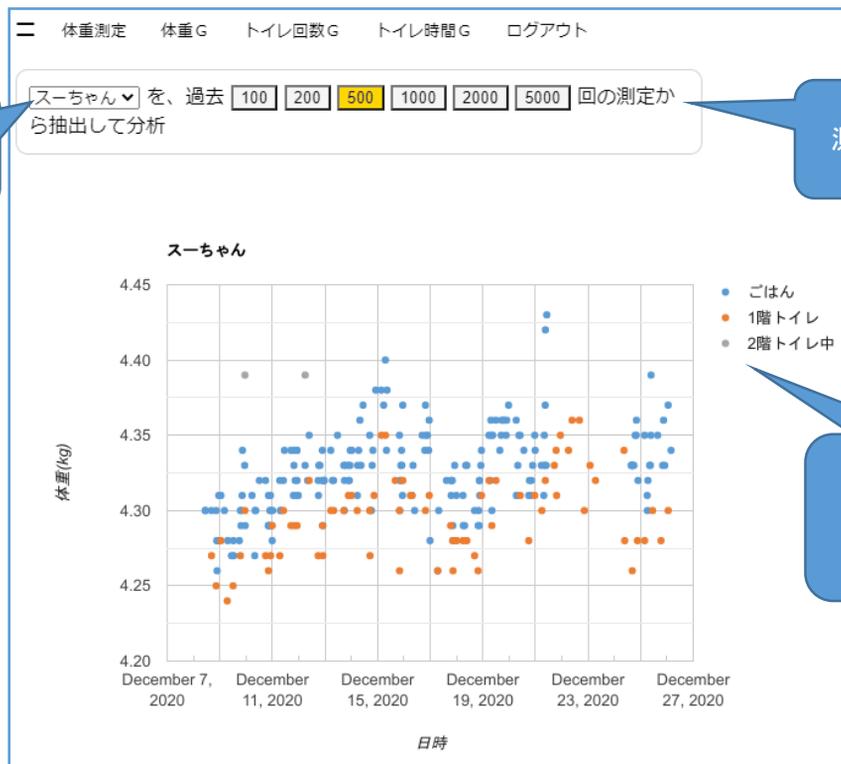


測定回数を選択

**設置場所**  
1頭の場合は  
設置場所を区別

# 12 トイレ回数G

- ・ 設置場所の名前にトイレの単語を含む結果を集計して、トレイに入った回数をグラフにします
- ・ 多頭飼の場合、みんな纏めてか、1頭1頭表示するか、選択します
- ・ グラフにする範囲は、過去の測定回数から選びます


**頭数**  
みんな纏めてか  
個別かを選択

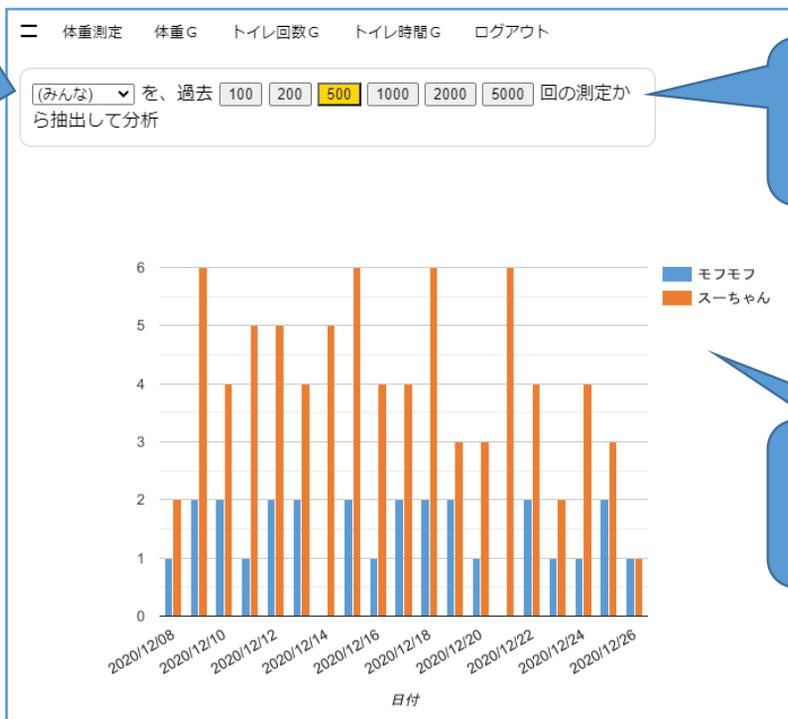

**測定回数**  
何個の測定を分析するかを選択

**名前**  
みんな纏めての場合  
は名前を区別


1頭を選んで

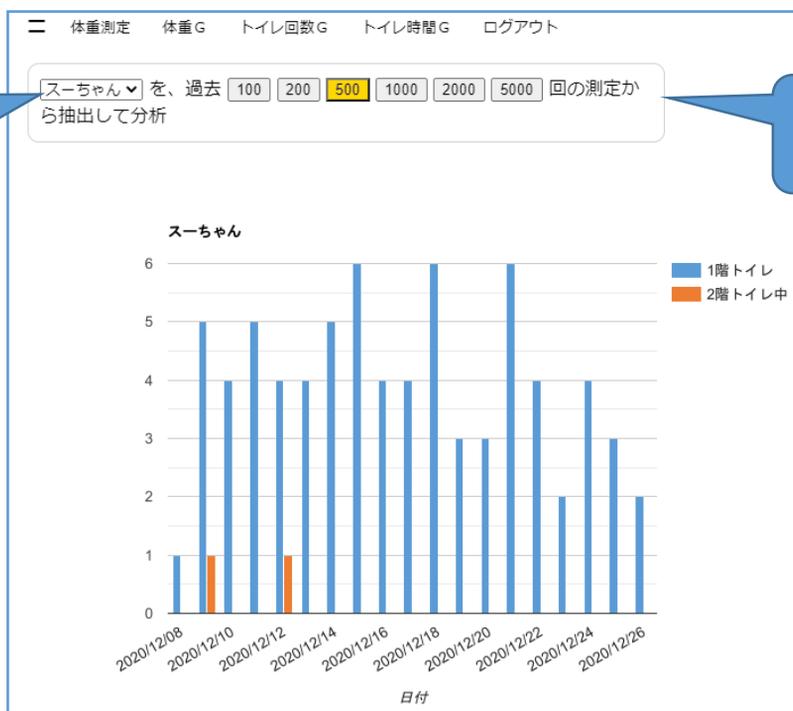

測定回数を選択

# 13 トイレ時間G

- 設置場所の名前にトイレの単語を含む結果を集計して、トレイに入った時間を1日毎に合計してグラフにします
- 多頭飼の場合、みんな纏めてか、1頭1頭表示するか、選択します
- グラフにする範囲は、過去の測定回数から選びます

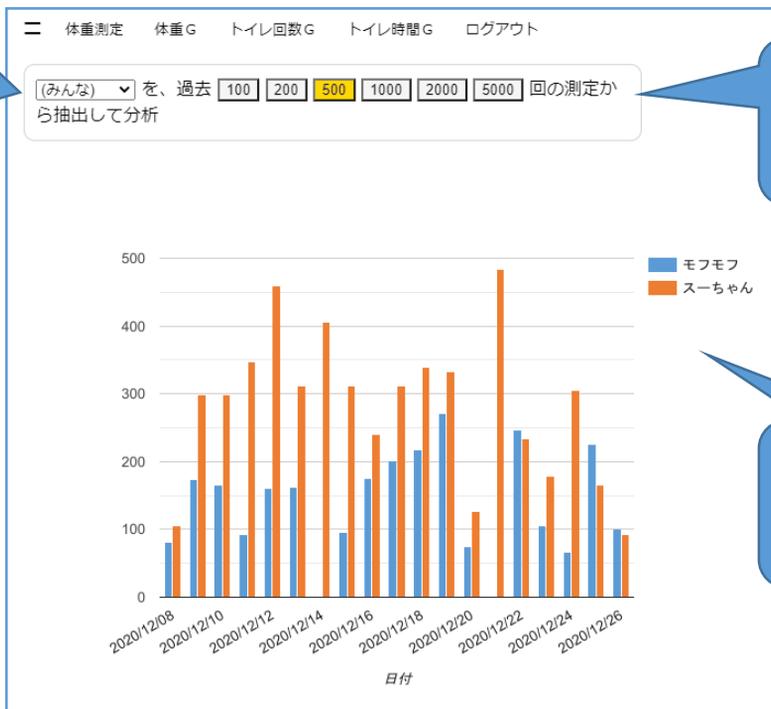

**頭数**  
みんな纏めてか  
個別かを選択

**測定回数**  
何個の測定を分析するかを選択

**名前**  
みんな纏めての場合  
は名前を区別



1頭を選んで

測定回数を選択